

Wartung und Unterweisung der Evac+Chair

Wartung des Evakuierungsstuhls

Damit Ihr Evakuierungsstuhl stets einsatzbereit und sicher bleibt, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich.

Wartungsumfang:

- » Alle Verschleißteile werden auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft und bei Bedarf ausgetauscht.
- » Bewegliche Teile werden geölt und gefettet, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- » Nach der Wartung wird ein umfassender Funktionstest durchgeführt und dokumentiert.
- » Kleinere Reparaturen können direkt vor Ort durchgeführt werden.
- » Der Austausch des Gleitriemens kann gegen Aufpreis durchgeführt werden (alle 4-6 Jahre erforderlich).

Wartungsintervall: Jährliche Wartung erforderlich (Grundlage: Arbeitsstättenverordnung §4 (3), Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV), Herstellerangabe).

Für Produkte, die älter als 10 Jahre sind, kann kein Instandsetzung mehr garantiert, da von Seiten des Herstellers keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.

Unterweisung der Mitarbeitenden

Neben der Wartung ist eine regelmäßige Unterweisung der Mitarbeitenden essentiell, um eine sichere und effiziente Nutzung des Evac+Chair zu gewährleisten.

Unterweisungsoptionen

Wir bieten zwei verschiedene Schulungsvarianten an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden:

Unterweisung (Anwenderschulung) für max. 12 Teilnehmende

In der Anwenderschulung werden die grundlegenden Funktionen und die Handhabung des Evakuierungsstuhls zur sicheren Überwindung von Treppen und zum sicheren Transport einer Person zum Sammelstelle vermittelt. Besonders geeignet bei Neuanschaffungen des Evac+Chair.

- » Zielgruppe: Geplante Anwender des Stuhls, z. B. Evakuierungshelfer.
- » Dauer: ca. 3 Stunden.
- » Unterlagen: Zertifikat als Nachweis für alle Teilnehmenden
- » Unterweisungsintervall: Jährliche Unterweisung (Grundlagen: DGUV Vorschrift 1 §4 (1))

Multiplikatoren-Unterweisung (Train-the-Trainer) für max. 6 Teilnehmende

Die intensive Einweisung für Multiplikatoren befähigt die Teilnehmenden, weitere Beschäftigte im Betrieb in der Verwendung des Evakuierungsstuhls zu schulen. Hier werden die Techniken zur erfolgreichen Nutzung und dem sicheren Umgang mit dem Stuhl vertieft.

- » Zielgruppe: Multiplikatoren im Unternehmen (z. B. Sicherheitsbeauftragte).
- » Dauer: ca. 7 Stunden.
- » Unterlagen: Zertifikat als Nachweis für alle Teilnehmenden, Gültigkeit 2 Jahre.
- » Unterweisungsintervall: Alle 2 Jahre (Grundlage: Herstellerangabe).

Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie, dass sowohl die Wartung als auch die Schulung durch speziell ausgebildete bzw. befugte Fachkräfte eines zertifizierten Unternehmens durchgeführt werden müssen. Nur so kann der Evac+Chair sicher und gefahrenfrei verwendet werden und die Garantieansprüche bleiben für den gesamten Zeitraum erhalten.