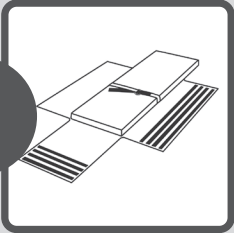


S-CAPEPLUS


THE EVACUATION SOLUTION

Schnelle und sichere Evakuierung von Personen mit Mobilitätseinschränkungen (z.B. Personen mit Rollstuhl oder bewusstlose Personen).
Einfache Handhabung durch eine oder zwei Personen.

Sofern möglich, bringen Sie die zu rettende Person in einen sicheren Raum oder in einen brandgeschützten Bereich auf gleicher Ebene (schließen Sie Brandschutztüren!). Bereiten Sie die Evakuierung für Rettungskräfte oder durch Sie selbst vor (siehe Punkt 1-3). Führen Sie die Evakuierung selbst durch, falls eine unmittelbare Gefahr besteht (z.B. starke Rauchentwicklung) oder sich das Eintreffen der Rettungskräfte zu lange verzögert. Überschätzen Sie sich dabei nie und versuchen Sie, die Situation realistisch einzuschätzen (Personengewicht, eigene Kräfte, geeignete Schuhe). Beim Transport auf Treppen kann ein großes Gewicht schnell auf Sie zukommen (beachten Sie daher vor allem die Hinweise unter Punkt 5). Beim geringsten Zweifel sollten Sie eine zweite Person zur Mithilfe hinzuziehen oder den Transport anderen überlassen. Ihre eigene Sicherheit hat immer Priorität. Trainieren Sie regelmäßig mit der S-CAPEPLUS und beachten Sie stets die Anweisungen.

1

Nehmen Sie die S-CAPEPLUS aus der Hülle. Klappen Sie die Abdeckung für den Fußbereich und die beiden Seitenteile nach außen auf. Öffnen Sie den Klettverschluss des Klettbandes in der Mitte der Matratze und ziehen Sie das Band durch den Metallring. Erklären Sie der zu rettenden Person (und gegebenenfalls weiteren Hilfspersonen), was Sie vorhaben. Die Evakuierung kann erheblich schneller durchgeführt werden, wenn alle Beteiligten wissen, wie Sie sich verhalten sollen.

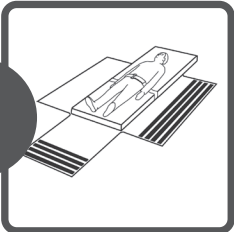2

Positionieren Sie die zu rettende Person mittig auf der Evakuierungsmatratze, so dass sich das Klettband im Bereich des Bauches befindet (zwischen Hüftknochen und Beginn des Rippenbogens). Führen Sie das Klettband über den Bauch durch den Metallring an der rechten Seite. Achten Sie beim Zusammenfügen des Klettverschlusses darauf, dass das Klettband fest um den Bauch der Person sitzt. Die Arme werden dabei nicht mit eingebunden (der gesamte Körper kann sonst in der Matratze verrutschen). Legen Sie die nun die Arme längs des Körpers auf das geschlossene Klettband.

3

Ziehen Sie jetzt die Seitenteile fest aufeinander zu (es ist von Vorteil, wenn Sie sich dabei - vom Fußende aus gesehen - auf der linken Seite der Matratze befinden). Drücken Sie nun die Klettverbindungen des rechten Seitenteils flächig auf die Klettverbindungen des linken Seitenteils. Verschließen Sie die Teile möglichst fest miteinander. Anschließend die Abdeckung für den Fußbereich auf die bereits verbundenen Seitenteile legen und mit Hilfe der Klettverbindung ebenfalls fest verschließen.

4

Zum Ziehen der S-CAPEPLUS sind am Fußende ein kurzer und ein langer Gurt angebracht. Verwenden Sie die den langen Gurt, um die zu rettende Person auf der Ebene zu ziehen. Der kurze Gurt kann beim langsamen Absenken auf Treppen verwendet werden (siehe Punkt 5). Eine zweite Person kann den Gurt am Kopfende benutzen, um das Steuern in Kurven zu erleichtern. Achten Sie beim Transport auf eine gewisse Vorspannung Ihrer Muskulatur. Wickeln Sie den Gurt niemals um Ihre Handgelenke oder um andere Körperteile (Verletzungs- und Unfallgefahr). Eventuell müssen Sie den Gurt auch schnell loslassen können (z.B. im Fall eines Sturzes).

5

Wenn Sie sich in einem oberen Stockwerk befinden, müssen Sie über die Treppe nach unten gelangen, da Sie im Brandfall keinen Aufzug benutzen dürfen. Dies wird Ihnen mit der S-CAPEPLUS auf einfache Weise gelingen, wenn Sie vorsichtig die Treppe hinuntergehen und die folgenden Hinweise beachten. Wenn immer es möglich ist, bitten Sie eine zweite Person den Gurt am Kopfende gut festzuhalten, um das Abbremsen beim Treppenabstieg unterstützen zu können. Stellen Sie sich selbst einige Stufen tiefer und ziehen Sie die zu rettende Person auf sich zu. Sobald sich das Gesäß (die Pobacken) der zu rettenden Person über der obersten Treppenkante hinaus befindet, lassen Sie die Matratze langsam ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich stets mit einer Hand am Treppengeländer festhalten. Halten Sie mit der anderen Hand ununterbrochen Kontakt mit der S-CAPEPLUS. Gehen Sie langsam und überspringen Sie keine Stufen.

Produktschulungen für die S-CAPEPLUS dürfen nur durch entsprechend geschultes und qualifiziertes Personal durchgeführt werden.