



Reinigung und Wartung

Evac+Chair International empfiehlt, dass alle Evac+Chairs während der gesamten Lebensdauer des Stuhls gewartet und gereinigt werden.

Die beschichteten Oberflächen und Stoffe sollten regelmäßig und **vorsichtig** gereinigt werden, wie unten beschrieben.

Beschichtete Oberflächen dürfen nur mit (1) einer Lösung aus warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel und/oder (2) Chloroxylonol (Bleichmittel mit Wasser in einem Verhältnis von 1:50 oder 1:99) **gereinigt werden.**

Alle anderen Oberflächen und/oder Materialien dürfen nur mit (1) einer Lösung aus warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel **gereinigt werden.**

Hinweis: Alle Oberflächen **dürfen nur** mit einem **weichen Tuch oder Schwamm** gereinigt werden.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Verwendung und/oder der Umgebung ab.

Im Falle einer medizinischen Anwendung sollte der Evac+Chair nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Alle anderen Anwendungen sollten je nach Ermessen des Nutzers entweder 3, 6 oder 12 Monate dauern.

Die Reinigung stellt sicher, dass die schützenden Eigenschaften der beschichteten Oberflächen erhalten bleiben.

Es empfiehlt sich, Aufzeichnungen über alle Reinigungspläne und -häufigkeiten zu führen.

R.A.Williams
Technischer Direktor
14. Januar 2013